



Mastatest®: Befüllen der Kartusche

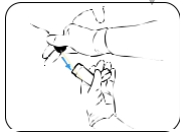


Nehmen Sie eine steril entnommene Milchprobe (siehe [Anwender-Videos](#)).




Ziehen Sie saubere Handschuhe an und nehmen Sie die Kartusche aus der Verpackung.

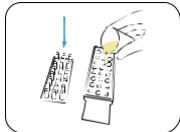

Nehmen Sie den Deckel von der Kartusche ab und befüllen Sie die Kartusche zur Hälfte mit Milch.

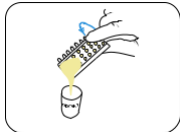

Gießen Sie die überschüssige Milch ab und werfen Sie den Überschuss.

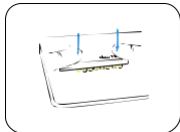

Setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie ihn fest nach unten. Beschriften Sie den Deckel mit den Angaben zur Kuh.



Klopfen Sie die Kartusche 2–3-mal kräftig auf einen harten Untergrund. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Luftblasen in den Vertiefungen sichtbar sind.



Legen Sie die Kartusche mit den Pfeilen **nach hinten** in die Lapbox™ und setzen Sie den Deckel wieder auf.

Mastatest®: Test starten

Erster Schritt:

- Wählen Sie im Hauptmenü der Lapbox **Mastatest starten** **ENTER**.
- Wählen Sie den verwendeten Lapbox-Platz aus: Wenn der erste freie Platz verwendet werden soll **ENTER**, oder scrollen Sie **▶**, um den Platz auszuwählen und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Option 1: BoxStart

- Testtyp auswählen:
 - Klinisch **ENTER**.
 - HiSCC **▼ ENTER**.
- Wählen Sie **BoxStart** **ENTER**.
- Geben Sie die Kuhnummer ein (z.B. 00123). **▼ ENTER**.
- Scrollen Sie nach unten, um ein Viertel auszuwählen **▼ ENTER**.
- Start bestätigen Sie mit **ENTER**.

Option 2: QuickStart

- Scrollen Sie nach unten, um den Testtyp auszuwählen:
 - Klinisch **▼▼ QuickCM ENTER**.
 - HiSCC **▼▼▼ QuickSCC ENTER**.
- Geben Sie die Testdetails innerhalb von 21 Stunden unter mastatestsystem.com ein.

Nächste Schritte:

- Countdown-Timer zeigt die verbleibende Testzeit an.
- Weitere Tests können unabhängig voneinander gestartet werden.
- Ergebnisse werden automatisch innerhalb von 24 Stunden per E-Mail verschickt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [Mastatest.com/user-guides](https://mastatest.com/user-guides)
support@mastatest.com